

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 3月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100053	
作業年月日	平成 28年 3月 4日		作業時間	: / Hr	
顧客名	岡村医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町19-1		電話番号	: 075-751-1981	
販売店	アルフレサ京都支店		ご担当	堀 士 様	
納入年月日	平成 22年 6月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
タッチパネル不良(勝手に起動してしまう)	
不具合原因、作業内容	
コントロール基板交換及びバリスタ取付。	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルス数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	プログラムVer 正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
完了	

装置 情報	交換後運転回数: 8 回	更新(リセット)実施・未実施 ☒	殺菌: 18 回	殺菌+アル: 202 回
	リークチェック: 回	自己洗浄: 175 回	アルコール単独: 回	エア単独: 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
(7402/2010880 → 付) 1016410973)		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
バリスタ		☒	1本	

お客様ご確認署名欄		→ 8 年 3 月 4 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	12 72	岡村

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山