

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 4月 13日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 871	
作業年月日	平成 28年 4月 13日		作業時間	:	Hr
顧客名	胡医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	京都府向日市寺戸町永田11-71		電話番号	:	075-924-2662
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 17年 12月 1日	保証期間	内 ☐ 外 ☒		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

点検項目			点検項目		
電源釦	正常	☒	オゾン分解ファン	正常	☒
フィルタリセット釦	正常	☒	排水	正常	☒
運転/停止釦	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
アルコールモード釦	正常	☒	オゾンインジケータ	正常	☒
操作パネル	正常	☒	酸素発生	正常	☒
蛍光灯	正常	☒	水漏れ確認 装置外	正常	☒
フタロック	正常	☒	水漏れ確認 装置内	正常	☒
給水	正常	☒	洗浄コネクタ	正常	☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	洗浄チューブ	正常	☒
細管洗浄 逆方向	正常	☒			
細管洗浄 エアパージ	正常	☒			
アルコールフラッシュ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	総運転回数: 1979 回	更新 (リセット) (実施)・未実施	交換後運転回数: 202 回
酸素発生	濃度: 93.8 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 118 ~ 208 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO, ☒ → NO, ☒
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 胡 美和子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山