

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. \_\_\_\_\_  
発行日 平成 28年 4月 12日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |          |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 300243 |              |
| 作業年月日 | 平成 28年 4月 12日                                                                          |                                                                       | 作業時間 | :        | Hr           |
| 顧客名   | あんどう内科 御中                                                                              |                                                                       | ご担当  | :        | 院長先生 様       |
| 所在地   | 兵庫県神戸市長田区水笠通4-4-19                                                                     |                                                                       | 電話番号 | :        | 078-611-7582 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | :        | 様            |
| 納入年月日 | 平成 26年 4月 30日                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |          |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |          |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |          |              |

|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 8/5    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺フューズ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0204/T02BV  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |

|          |               |                |              |             |
|----------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 99 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 消毒: 208 回    | 消毒+アル: 23 回 |
|          | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 2 回      | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回   |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 12/21258 → NO. 11/040632                  |
| 排水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 131107-015 → NO. 130725-008               |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
| バリスタ      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   |                                                       |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                       |

|                                   |  |       |
|-----------------------------------|--|-------|
| お客様ご確認署名欄                         |  | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |  |       |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |  |       |
| ご署名 安藤 健治                         |  |       |

|                                                               |       |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店<br>大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1<br>TEL: 06-6228-3311 | 責任技術者 | 作業者 |
|                                                               |       | 中山  |