

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 4月 19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300559
作業年月日	平成 28年 4月 19日		作業時間	: 1 Hr
顧客名	くしもと町立病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7		電話番号	: 0735-62-7111
販売店	セパコ X1110L (株)		ご担当	様
納入年月日	平成 27年 4月 24日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴																																																	
不具合原因、作業内容																																																	
点検項目 <table border="0"> <tr> <td>フタロック</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌槽 LED</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>エアライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>オゾン水濃度計動作</td> <td>正常 ☒ パルス数 495</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td> <td>正常 ☒</td> <td>排水栓、排水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>細管送水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td> <td>正常 ☒</td> <td>排気ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td> <td>正常 ☒</td> <td>オゾン濃度</td> <td>正常 ☒ 履歴 0.70 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td> <td>正常 ☒</td> <td>異常音、振動</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>清掃</td> <td>正常 ☒</td> <td>電源コード</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>トレイ</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌チューブ類</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>殺菌槽コネクタ</td> <td>正常 ☒</td> <td>マニホールド周辺チューブ</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>プログラムVer</td> <td>正常 ☒</td> </tr> </table>		フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 495	オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm	水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒			プログラムVer	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒																																														
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒																																														
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 495																																														
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒																																														
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒																																														
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒																																														
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm																																														
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒																																														
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒																																														
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒																																														
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒																																														
		プログラムVer	正常 ☒																																														
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 定期メンテナンス 実施 1回目																																																	

装置 情報	交換後運転回数: 846 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 354 回	消毒+アル: 493 回
	リークチェック: 477 回	自己洗浄: 144 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13111618 → NO.10080350
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.180225-012 → NO.140708-006
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		28. 4. 19 日 くしもと町立病院 ご署名
--	--	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	福田