

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 2 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	300158	
作業年月日	平成 28 年 2 月 8 日		作業時間	Hr	
顧客名	たばこに内科 御中		ご担当	様	
所在地	姫路市		電話番号		
販売店	アールエス(株)		ご担当	様	
納入年月日	平成 26 年 1 月 4 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注意 49発 E=111

不具合原因、作業内容

排水フィルター - 詰り

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハル数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.173 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フィルター - 交換にて対応。 修理費用 ¥15,000 - (作業費込み)

装置 情報	交換後運転回数： 08 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 4 回	消毒+7L： 170 回
	リークチェック： 1 回	自己洗浄： 3 回	7Lアルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2016 年 2 月 8 日

ご署名

銅谷重昭

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

銅谷重昭