

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 5月 24日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10	製造番号	: 1535
作業年月日	平成 28年 5月 24日	作業時間	: / Hr
顧客名	大同クリニック 御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市平野区長吉六反3-21-7	電話番号	: 06-6790-1945
販売店	株式会社 やまゐ 大阪支店	ご担当	様
納入年月日	平成 20年 4月 2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 9 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	総運転回数: 2 回	更新 (セット) 実施・未実施	交換後運転回数: 2 回
酸素発生	濃度: 95.5 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 107 ~ 202 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 10846 → NO. 11987
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

医療法人 栄和会

ご署名 大同クリニック 長原院

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山 祐田