

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 4月 28日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S			製造番号	: 300156
作業年月日	平成 28年 4月 28日			作業時間	: Hr
顧客名	いちば内科 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪市平野区加美南1-2-27加美グリーンテラスクリニックモール			電話番号	: 06-6796-2111
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 26年 1月 8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 549
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 831 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 1234 回	消毒+アル: 11 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 117 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12091168 → NO. 11120808
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 100610-019 → NO. 130718-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
バルブスタ		☒	1本	
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		年 月 日 市 場 誠 ご署名
---	--	---------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山