

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 5月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100219	
作業年月日	平成 28年 5月 2日		作業時間	: Hr	
顧客名	河島医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-1-24		電話番号	: 06-6629-2110	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 23年 4月 6日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 403
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.17 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0/07 / To1.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 13 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 9 回	殺菌+アル: 2129 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1313 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO, X
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, X → NO, X
フタロックASSY		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
コントロール基板		☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	コントロール基板 NO.06/60/0890 → NO.11185/0973

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 河島	

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店	責任技術者	作業着
	大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1		中山
	TEL : 06-6228-3311		