

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 3月 24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S			製造番号	: 300010
作業年月日	平成 28年 3月 24日			作業時間	:

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 482
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0207/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 506 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 422 回	消毒+アル: 814 回
	リークチェック: 588 回	自己洗浄: 290 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12081151 → NO.10080363
排水フィルター	新型	☒	2個	オゾンセンサ NO.110615-004 → NO.110301-015
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
バリスタ		☒	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	ご署名 神澤

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山