

保守点検・修理 報告書

管理 No.

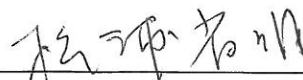
発行日 平成 28年 3月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100461
作業年月日	平成 28年 3月 25日		作業時間	: Hr
顧客名	松浦クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県加古川市尾上町長田517-48		電話番号	: 079-422-3828
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 24年 4月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 601
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107 / TOLA
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 65 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 27 回	殺菌+アル: 204 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 306 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 4 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10060263 → NO. 13091549
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 111019-029 → NO. 131029-005
バックス		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄		年	月	日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山