

オゾン水濃度測定報告書

管理 No. 20160318

発行日 平成 28年 3月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100055
作業年月日	平成 28年 3月 18日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	大塚医院 御中	TEL:	075-881-3088
所在地	京都府京都市右京区梅津前田町 65-4		
納入年月日	平成 22年 7月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	前回点検日: 平成27年10月8日

1: 測定方法

オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000に搭載されているオゾン水濃度計 (No. 12071121) につきまして基準器と比較しながら測定します。

2: 基準器

荏原実業株式会社製 オゾンモニタ 型式 PL 620A 製造番号6060185

3: 測定条件およびデータ

運転モード: 殺菌 水槽内容物: トレー

実測時間 (分)	タッチパネル 表示時間 分 (参考)	1回目:11時52分		2回目:12時07分	
		OED-1000	基準器	OED-1000	基準器
0.0	10	0.00	0.00	0.00	0.01
0.5	10	0.28	0.32	0.29	0.30
1.0	9	0.75	0.74	0.77	0.75
1.5	9	0.69	0.74	0.70	0.74
2.0	8	0.61	0.65	0.62	0.65
2.5	8	0.75	0.79	0.73	0.77
3.0	7	0.66	0.71	0.61	0.65
3.5	7	0.72	0.74	0.79	0.82
4.0	6	0.68	0.73	0.67	0.72
4.5	6	0.61	0.66	0.72	0.74
5.0	5	0.79	0.82	0.72	0.76
5.5	5	0.69	0.74	0.61	0.65
6.0	4	-	0.65	-	0.69
計測器の平均値		0.70	0.73	0.69	0.73
タッチパネルの殺菌履歴		0.70		0.70	

単位 (ppm)

4: 測定結果

基準器に対してタッチパネルの殺菌履歴濃度が0.7±0.2ppm以内であること。

測定 1 回目: 基準器 0.73ppm タッチパネルの殺菌履歴 0.70ppm ・ ・ 合格

測定 2 回目: 基準器 0.73ppm タッチパネルの殺菌履歴 0.70ppm ・ ・ 合格

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528



承認	作業者
安 16.3.30 田	中 16.3.30 澤

オゾン水濃度測定 工事写真

撮影日：平成28年3月18日

撮影場所:大塚医院様 (京都府京都市)

写真1:計測状況全景



写真2:基準器拡大



写真3:タッチパネル拡大



写真4:タッチパネル「装置情報」

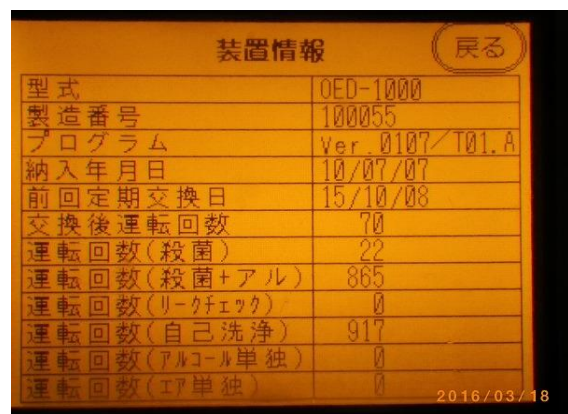


写真5:タッチパネル「殺菌履歴」





証明書番号 EJ770123
(Certificate No.)

校正証明書

(Calibration Certificate)

株式会社IHIシバウラ 御中
(Customer name)

荏原実業株式会社 計測器・医療本部
〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12

Ebara Jitsugyo Co. Ltd.
Measuring Instrument and Medical Division
2-3-12 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa, 215-0033 JAPAN

名称
(Product name)

オゾンモニタ
Ozone Monitor

型式
(Model)

PL-620A

製造番号
(Serial No.)

6060185

校正実施月日
(Calibration date)

2015/9/10

上記測定器は、当社のオゾンモニタ基準器と比較
校正したことを証明致します。

We hereby certify that the above mentioned equipment was calibrated
in comparison with our ozone monitor standard.

使用基準器
(Standard used)

型 式
(Model)

EL-2001S

基準器管理番号
(Control No. of standard)

EK010A0