

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 2月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300046	
作業年月日	平成 28年 2月 18日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	大仙病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	大阪府堺市西区北条町1丁目2番31号		電話番号	: 072-278-2921	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 8月 21日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
タッチパネルにタッチしても起動しない ※	 3本指で同時に タッチ
不具合原因、作業内容	
念のためにタッチパネルで交換しましたが、改善しませんでした。 確実に操作するために、1本指でタッチパネルを押し下ろす	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒ 未実施	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 409
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	プログラムVer 正常 ☒ 02071 T02BV
作業結果 (完了) 暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 507 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1724 回	消毒+アル: 513 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 4 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル (基板含む)		☒	1台	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールタンクキャップ		☒	1コ	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	和田 慎一郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山 ISM 中澤