

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 4 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300154
作業年月日	平成 28 年 4 月 12 日		作業時間	: Hr
顧客名	1747 医院 御中		ご担当	: 様
所在地	加西市		電話番号	:
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	平成25年 12月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
排水装置 E=111 多発	
不具合原因、作業内容	
排水フィルター - 詰り	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	プログラムVer 正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
排水フィルター - 交換により正常 前回14年12月11日	

装置 情報	交換後運転回数: 1071 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 1765 回	消毒+アル: 417 回
	リークチェック: 823 回	自己洗浄: 290 回	アルコール単独: 26 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
28年 4月 12日 医療法人社団佐竹医院 佐竹 信哉 ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	（印）