

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 6月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300154
作業年月日	平成 28年 6月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	佐竹医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県加西市北条町北条16		電話番号	: 0790-42-4057
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 12月 27日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・6/1(土)より6/12(月)まで「E」108 光量低下注意」計5回、6/4(火)より6/5(水)まで「E」205 「オーバー72-異常」計13回発生。					
不具合原因、作業内容					
・光量低下注意は、保守交換部品に含まれるオゾン水濃度計の性能低下が原因と考えられます。 ・オーバー72-異常は、コントロール基板、水位センサー(HH)、脱気フィルター、カートの接続線が原因と考えられます。					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 112
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺ファブ	正常	☒ 0207
			プログラムVer	正常	☒ 0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
・光量低下注意 → 保守部品の交換をお願いします。 ・オーバー72-異常 → コントロール基板、水位センサー(HH)、交換、接続線接続が完了。	

装置情報	交換後運転回数: 1246回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 868回	消毒+7L: 789回
	リークチェック: 868回	自己洗浄: 330回	アルコール単独: 29回	エア単独: 1回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
コントロール基板		☒	1枚	コントロール基板 No. 0153/0970 → No. 10165/0973
水位センサー	HH	☒	1個	

お客様ご確認署名欄	NyM28(2.82) → NyAC135(1.75)	28年 6月 15日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	17247 信司	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山