

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-20222

No. 160702

納入先	新鋭工業（株） 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	奈良県奈良市三条松町 17-17		機番	001537
ユーザー名	うえしげクリニック 様		納入日	平成20年5月22日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年8月17日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成28年7月2日

不具合内容

オゾンインジケータ変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

オゾンインジケータ変色不良はPSA（酸素発生装置）の性能低下が原因でした。
上記に関する部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.45～0.52 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.093～0.170 MPa（AC100V, 60Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：1144

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		PSA；SPS-12007
4	配管チューブ、パッキン	1式	水槽タンクキャップ含む
5	タッチシート	1枚	今回無償

承認



審査



作成

H28.7.2

中澤