

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 7月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100565	
作業年月日	平成 28年 7月 13日		作業時間	: Hr	
顧客名	せと肛門胃腸クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	滋賀県大津市小野375番地1		電話番号	: 077-594-8533	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 10月 31日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 463
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0/07/TOL/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 1562 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 8658 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 384 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13081491 → NO. 11080771
給水フィルター	(糸巻き)	☒	1個	オゾンセンサ NO. 09126-021 → NO. 111018-006
パルス計		☒	1台	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 332 / 2016	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山