

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 7月 4日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300346	
作業年月日	平成 28年 7月 4日		作業時間	:	Hr
顧客名	そうわ内科クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市浪速区浪速東3-9-24		電話番号	:	06-6626-9939
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 7月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 840
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204/To2BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数:	195 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒:	46 回	消毒+アル:	298 回
	リークチェック:	1 回	自己洗浄:	1 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:
交換部品名称		部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >		
定期交換部品セット			☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11040638 → NO. 16062367		
排水フィルター			☒	1個	オゾンセンサ NO. 140423-008 → NO. 141216-002		
給水フィルター			☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、(コネクタ継手)		
アルコールポンプ		新型	☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし		
お客様ご確認署名欄							
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。							
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。							
28年 7月 4日							
ご署名 児島 研美							

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山