

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 7月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300563	
作業年月日	平成 28年 7月 12日		作業時間	:	Hr
顧客名	道仁病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府寝屋川市仁和寺町31-1		電話番号	:	072-827-1951
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 6月 17日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 539
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 873 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 536 回	消毒+アル: 338 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13121622 → NO. 10090387
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 140220-014 → NO. 131107-011
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
H28年 7月 12日	
ご署名 長山 しのぶ	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山