

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 7月 5日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300309
作業年月日	平成 28年 7月 5日		作業時間	: Hr
顧客名	にきクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県西宮市津門呉羽町1-28 今津医療センター4階		電話番号	: 0798-34-8181
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 7月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 682
オゾンセンサー 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 935 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 803 回	消毒+アル: 1057 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: / 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: / 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12030949 → NO. 16062366
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 141209-003 → NO. 131210-004
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
バルブ		☒	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1式	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
〓 アルコールキャップ 新型 1個	年 月 日 ご署名 仁木正乙

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山