

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 7月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100791	
作業年月日	平成 28年 7月 1日		作業時間	:	Hr
顧客名	西成民主診療所 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市西成区松2丁目1-7		電話番号	:	06-6659-1010
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 7月 3日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 596
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/To1A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数:	99 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌:	133 回	殺菌+アル:	220 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	5 回	アルコール単独:	/ 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13021299 → NO. 11020593
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 140520-003 → NO. 120516-006
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2016 年 7 月 1 日	
ご署名 西崎 未来	

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店	責任技術者	作業者
	大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1		中山
	TEL : 06-6228-3311		