

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 7月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100229	
作業年月日	平成 28年 7月 13日		作業時間	: Hr	
顧客名	前川医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県奈良市登美ヶ丘1-12-3		電話番号	: 0742-46-2246	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 23年 5月 17日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

電源を入れたとLEDライトが点灯する。

不具合原因、作業内容

コントロール基板、LED付基板が不具合をおこしていると思われました。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 278
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/T01A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記部品を交換し、正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 45 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌: 862 回	殺菌+アル: 38 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 648 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 29 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
コントロール基板		☒	1枚	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
LED付基板		☒	1枚	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		コントロール基板No. 0707010890 → No. 015510973

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年 7月 13日

ご署名 前川 泰寛

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山