

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 6月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100786	
作業年月日	平成 28年 6月 1日		作業時間	:	Hr
顧客名	ふなきクリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	京都府京都市西京区大枝北福西町2丁目12-1		電話番号	:	075-335-0220
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 6月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハル数 525
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/ToKA
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 232 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 3 回	殺菌+アル: 526 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 180 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0/03 → NO.1212/267
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.1412-006 → NO.110614-007
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	平成 28年 6月 1日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 森 京子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山