

保守点検・修理 報告書

管理 No. \_\_\_\_\_  
発行日 平成 28年 5月 13日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |  |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300308                                      |  |
| 作業年月日 | 平成 28年 5月 13日                            |                               | 作業時間                                                             | : _____ Hr                                    |  |
| 顧客名   | 奥医院 御中                                   |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |  |
| 所在地   | 大阪府東大阪市柏田本町3-8                           |                               | 電話番号                                                             | : 06-6721-1324                                |  |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |  |
| 納入年月日 | 平成 26年 5月 30日                            | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 2回目                                                              | 定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |  |

|                           |    |                                     |              |    |                                                  |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                  |
|                           |    |                                     |              |    |                                                  |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                  |
|                           |    |                                     |              |    |                                                  |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                  |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 535     |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm  |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                           |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0204 / To2BV |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                  |
|                           |    |                                     |              |    |                                                  |

|          |          |       |                                                                                |      |          |        |       |
|----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 197 回 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒:  | 178 回    | 消毒+アル: | 166 回 |
|          | リークチェック: | 2 回   | 自己洗浄:                                                                          | 40 回 | アルコール単独: | 1 回    | エア単独: |

|           |       |                                     |      |                                         |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                |
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10050231 → NO. 13101554     |
| 排水フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. 130717-012 → NO. 131126-019 |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、            |
| アルコールキャップ | 新製    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし               |
| バリスタ      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   |                                         |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年 5月 13日

ご署名 奥医院 小田

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL : 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |