

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 5月 13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300191	
作業年月日	平成 28年 5月 13日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	栄宏会 小野病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県小野市天神町973番		電話番号	: 0794-62-9900	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 3月 10日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
5/11(水) E:201 起動時給水異常が8回発生。

不具合原因、作業内容
給水ホースフィルタにゴミ等が付着していました。

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 477
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204/TO2BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
ゴミ等を除去し、正常作動したので終了。
水圧は 2.5kgf/cm² ありましたが、正常値です。 水圧正常値: 1~8kgf/cm²。

装置 情報	交換後運転回数: 31 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 2/2 回	消毒+7L: 542 回
	リークチェック: 275 回	自己洗浄: 3/3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット	X	☐	1セット	
排水フィルター		☐	1個	
給水フィルター		☐	1個	
		☐		
		☐		
				オゾン水濃度計 NO, X → NO, X
				オゾンセンサ NO, X → NO, X
				オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
			中山