

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 5月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100323
作業年月日	平成 28年 5月 25日		作業時間	: Hr
顧客名	そりおクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ宝塚3号棟1階		電話番号	: 0797-81-4655
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 23年 10月 6日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・4/14(木)から5/25(水)まで計7回「E:207 オゾン水生成異常」が発生。			
不具合原因、作業内容			
・水槽フィルターの目詰まりが原因と見られます。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 593
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/150/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・水槽フィルターを交換し、正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 67 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 7 回	殺菌+アル: 514 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 500 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO, X
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, X → NO, X
水槽フィルター		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
バルブスタ		☒	1本	
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
宝塚市栄町2丁目2番1号(ソリオ1F)		
そりおクリニック		
ご署名		電話 (0797) 81-4655代

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山