

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 4月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300305
作業年月日	平成 28年 4月 27日		作業時間	: Hr
顧客名	内藤クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県尼崎市南塚口町 1 丁目30-10		電話番号	: 06-6427-1570
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 5月 16日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・水槽内交換の破損。			
不具合原因、作業内容			
・水槽内交換 - に負荷がかかり破損。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 207
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・水槽内交換-強化仕様へ交換し終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 354 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 657 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 119 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
・水槽内交換		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。				
ご署名 上橋				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1 - 6 - 1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山