

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-21698

No. 160601

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所 様		機番	100185
環営	所在地	奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 2790 番地		納入日	平成 23 年 2 月 3 日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 4 月 15 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 5 月 25 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

水漏れ
フタを閉めるときに引っ掛かる

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして
水漏れは再現しませんでした。水槽下部に水漏れの跡を確認しました。
配管接手の増し締めと、関係する部品を全て交換しました。

フタの開閉不具合につきまして
フタの金具が「上部カバーの切欠き」に干渉しており、金具を調整しました。

フタの金具

上部カバー切欠き



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 性能確認・・・正常 酸素流量：0.82 L/min
- 運転確認・・・正常 濃度履歴：0.69 ppm, 濃度計パルス：705
- 装置情報
前回定期交換日：2011/02/03 運転プログラム：Ver0107/T01.A
交換後運転回数：43 殺菌：32、殺菌＋アルコール：204、リークチェック：298
自己洗浄：121、アルコール単独：0、エア単独：2

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	水位レベルセンサー	1 個	LVH
	上部カバーシール材	1 式	

承認



審査



作成

H28. 6. 1
中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528