

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 03-21587 No. 160721

|       |                   |      |     |            |
|-------|-------------------|------|-----|------------|
| 納入先   | 新鋭工業 (株) 大阪支店 殿   |      | 機種  | ONW-10     |
| 所在地   | 大阪府高槻市柳川町2丁目14-21 |      | 機番  | 001534     |
| ユーザー名 | 西野医院 様            |      | 納入日 | 平成20年3月21日 |
| 点検者   | 中澤一裕              | 作業時間 | 受付日 | 平成28年3月16日 |
| 返送先   | 納入先と同じ            |      | 発送日 | 平成28年7月21日 |

## 修理依頼・異常内容

電源が入らない

## 不具合原因 (故障箇所) と処置

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

コントロール基板の故障により電源が入らない状態でした。  
電源系統に異常は見られないため、コントロール基板の単独故障と判断し、これを交換しました。

1~4 : コントロール基板、定期交換部品

5~12 : ポンプ、チューブ、センサ、電磁弁



### [2] 修理・点検内容

- 部品交換 (下表と写真をご参照ください)
- オゾン水濃度測定 : 0.44~0.53 mg/L ・ ・ 正常
- PSA (酸素発生装置) 性能点検 ・ ・ 正常  
酸素濃度 : 93.9 % 酸素流量 : 0.75 L/min 圧力 : 0.093~0.177 MPa
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。

—以上—

|                |
|----------------|
| 承認             |
|                |
| 審査             |
|                |
| 作成             |
| H28.7.21<br>中澤 |

| 交換部品  |                    |    |           |
|-------|--------------------|----|-----------|
| 部品コード | 部品名称               | 数量 | 備考        |
| 1     | コントロール基板           | 1枚 |           |
| 2~4   | 定期交換部品             | 1式 |           |
|       | 吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ  |    | SPS-12013 |
| 5     | 水位レベルセンサー          | 3本 |           |
| 6     | 配管チューブ、パッキン        | 1式 |           |
| 7     | エアコンプレッサー          | 1台 |           |
| 8~10  | 水ポンプ (P-1、P-2、P-3) | 3台 |           |
| 11    | 給水電磁弁              | 2個 |           |
| 12    | 排水バルブ (駆動用抵抗含む)    | 1式 |           |