

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 7月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100052	
作業年月日	平成 28年 7月 27日		作業時間	:	Hr
顧客名	西村医院 御中		電話番号	:	院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区東町198		ご担当	:	075-611-6127
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 22年 5月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルを触っても電源が入らない。

不具合原因、作業内容

タッチパネルの不具合が原因と見られます。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 738
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/TOLIA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネルを交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 203 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 361 回	殺菌+7L: 444 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 4 回	7Lアルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.11080773 → NO.12061088
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.150217-012 → NO.121002-019
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 接続 継手、
バースタ		☒	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	タッチパネルS/N:1087374H007459 → S/N:087374H03071

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年 7月 27日

女署名 田中 俊一

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山