

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 6月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100739
作業年月日	平成 28年 6月 7日		作業時間	: Hr
顧客名	まちだ内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県田辺市下三栖1257-4		電話番号	: 0739-33-8282
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 6月 24日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 589
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0/07 / To/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	763 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	763 回	殺菌+アル:	0 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	1 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12030950 → NO. 11120821
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 111018-007 → NO. 140107-013
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄		年	月	日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		ご署名 新田 和生		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山