

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 6月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300045	
作業年月日	平成 28年 6月 9日		作業時間	:	Hr
顧客名	橋村医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市浪速区大国2-6-11		電話番号	:	06-6641-6512
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 9月 1日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・6/7(火)より6/9(木)まで「E:111 排水注意」が計15回発生。

不具合原因、作業内容
・排水フィルターの目詰まりが原因と見られました。

点検項目							
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒		
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒		
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数	493
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒		
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒		
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒		
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴	0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒		
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒		
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒		
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒		
			プログラムVer	正常	☒	0204 / To2.B	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・排水フィルターを交換し、正常作動したのを終了。

装置 情報	交換後運転回数: 382 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 743 回	消毒+アル: 823 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター	新製	☒	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
H28 年 6 月 9 日
ご署名 橋村 正治

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山