

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-21107

No. 160812

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店		機 種	ONW-10
所在地	兵庫県姫路市広畑区西夢前台 8-1		機 番	001588
ユーザー名	クレモト外科 様		納入日	平成 21 年 1 月 20 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 3 月 29 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 28 年 8 月 09 日

修理依頼・不具合内容

「給水量不足」異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異常が再現することを確認しました。水位センサの不具合が原因でした。
この部品と、性能が劣化した部品を交換して復旧しました。

No.1、2、6：水位センサ、電磁弁、チューブ

No.3～5：定期交換部品



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.45～0.53 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.3 % 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.102～0.180 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・12708

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	給水電磁弁	2 個	
2	水位レベルセンサー（LVL）	1 本	
3～5	定期交換部品		
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、オゾン触媒	1 式	
6	配管チューブ、パッキン	1 式	

承認

安
16.8.12
田

審査

中
16.8.12
澤

作成

H28. 8. 12
中澤