

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-20852

No. 160609

納入先	新鋭工業（株） 大阪支店 殿		機種	ONW-10B
所在地	兵庫県尼崎市武庫之荘東 2-14-21		機番	001447
ユーザー名	太田内科医院 様		納入日	平成 20 年 8 月 9 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 12 月 3 日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成 28 年 6 月 6 日

不具合内容

各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

センサー類やポンプ類など、交換が必要な部品を交換いたしました。

No. 1～2：触媒、配管チューブ、パッキン



No. 3～9：ポンプ、センサー、電磁弁 ほか



修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.45～0.58 mg/L・・・正常
3. 酸素流量：0.76 L/min
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：663

承認



審査



作成

H28. 6. 9

中澤

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1	オゾン分解触媒	1 個	
2	配管チューブ・パッキン	1 式	
3～5	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3 台	
6	水位レベルセンサー	3 本	
7	オゾンセンサー	1 台	
8	給水電磁弁	2 個	
9	排水バルブ（駆動用抵抗含む）	1 式	