

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 6月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300154	
作業年月日	平成 28年 6月 27日		作業時間	:	Hr
顧客名	佐竹医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県加西市北条町北条16		電話番号	:	0790-42-4057
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 12月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 620
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0207/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1282 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 889 回	消毒+アル: 804 回
	リークチェック: 875 回	自己洗浄: 339 回	アルコール単独: 30 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12/01189 → NO. 12030946
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 100610-007 → NO. 130516-018
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
イバタ基板	オゾン水濃度計用	☒	1枚	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		イバタ基板 No. T1 CBZSK → No. T1 FLYSL

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 岩佐 真寿美

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山