

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 8月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100236
作業年月日	平成 28年 8月 23日		作業時間	: Hr
顧客名	やすだ医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市此花区西九条3丁目8-11		電話番号	: 06-6463-5446
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 23年 9月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 469
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0/07/T0/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 291 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 24 回	殺菌+アル: 268 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10060285 → NO. 09120026
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 100610-002 → NO. 121002-027
パルス計		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山