

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 6月 29日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号	: 300736
作業年月日	平成 28年 6月 29日	作業時間	: Hr
顧客名	浦医院・胃腸・肛門科 御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市黒田1丁目1-10クリニッセル上林1階	電話番号	: 073-475-1113
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 28年 1月 12日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検ソール記入	☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・水漏れが発生。	
不具合原因、作業内容	
・本体に接続している給水ホースの接続部より水漏れしていました。 給水ホースの取り付けが緩かったため水が漏れていました。	
点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 394
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
プログラムVer	正常 ☒ 0207/T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
・給水ホースを付けなおし正常作動したので終了。	

装置情報	交換後運転回数: 333 回	更新（リセット）実施: 未実施	消毒: 130 回	消毒+アル: 204 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 107 回	アルコール単独: 8 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	28年 6月 29日 田中陽子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山