

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-21816

No. 160630

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	三好内科 様			機番	100550
環営	所在地	大阪府池田市呉服町3-9			納入日	平成24年9月4日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成28年5月13日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成28年6月27日

修理依頼・不具合内容


殺菌水槽の底手前中心部より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

写真の矢印部分に発生した小さい亀裂から水が漏れることを確認しました。
この部分を接着・溶接補強して復旧いたしました。

写真：水漏れ箇所

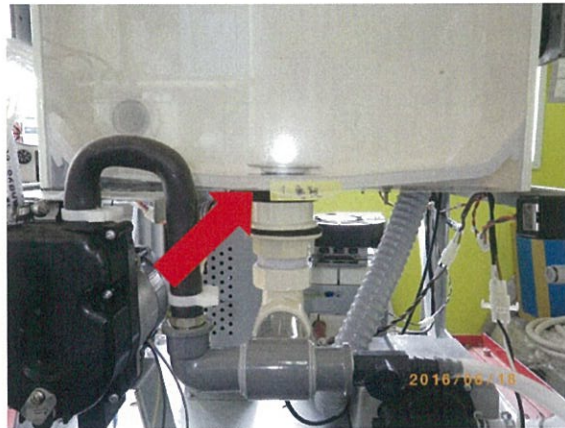

〔2〕作業内容

- 1：水槽の漏れ確認：水を張った状態で3日間実施・・・水漏れなし
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

〔3〕装置情報

交換後運転回数：1932 殺菌：6928、殺菌＋アルコール：3701、リークチェック：10677
自己洗浄：756、アルコール単独：268、エア単独：1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

承認

安
16.6.30
田

審査

中
16.6.30
澤

作成

H28.6.30
中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528