

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 9月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300371	
作業年月日	平成 28年 9月 6日		作業時間	:	Hr
顧客名	KKCウエルネス栗東健診クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	滋賀県栗東市小野501-1		電話番号	:	077-551-0500
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 9月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 437
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207/T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 541 回	更新(リセット) (実施)・未実施	消毒: 590 回	消毒+アル: 250 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 94 回	アルコール単独: 11 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11080738 → NO. 12051059
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 12101-023 → NO. 120711-021
給水フィルター	中央系 新型	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 <u>コネクタ</u> 継手、 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキャップ		☒	1個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 柴山 愛子

修理業者	新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業 者
			中山