

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 9月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100549	
作業年月日	平成 28年 9月 8日		作業時間	:	Hr
顧客名	杉町医院 御中		電話番号	:	院長先生 様
所在地	兵庫県川西市小戸1丁目5-6		ご担当	:	072-758-8470
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 24年 9月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 827
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/TO/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 208 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 28 回	殺菌+アル: 811 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 719 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回
交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10010089 → NO. 13121642
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 150309-012 → NO. 150115-008
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、不劣継手、
アルコールキャップ	新型	☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
お客様ご確認署名欄				
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名 梅田				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山