

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 9月 9日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                    |                                                                       | 製造番号 | : 100110       |
| 作業年月日 | 平成 28年 9月 9日                                                                           |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 明海病院 御中                                                                                |                                                                       | 電話番号 | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 兵庫県明石市藤江201                                                                            |                                                                       | ご担当  | : 078-922-8800 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 平成 22年 9月 15日                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 509    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0107/TOLA   |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |

|          |                |                |            |               |
|----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 341 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: 369 回  | 殺菌+7ル: 1760 回 |
|          | リークチェック: 4 回   | 自己洗浄: 7229 回   | 7ル単独: 74 回 | エア単独: 2 回     |

| 交換部品名称           | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                      |
|------------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 定期交換部品セット        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10120479 → NO. 12051051           |
| 給水フィルター          |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 150309-011 → NO. 1405217-006      |
| バリストマニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし |
|                  |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                               |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| お客様ご確認署名欄                                                            |     |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |     |
| 年                                                                    | 月 日 |
| ご署名 出井                                                               |     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |