

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 7月 22日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300041
作業年月日	平成 28年 7月 22日		作業時間	: _____ Hr
顧客名	野木病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1		電話番号	: 078-947-7272
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 7月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 523
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/702.B
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 714 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 257 回	消毒+アル: 1910 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 588 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13051406 → NO. 10010081
排水フィルター（新型）		☒	1個	オゾンセンサー NO. 141225-007 → NO. 111207-034
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
バリスタ		☒	1本	
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	

お客様ご確認署名欄		28 年 7 月 22 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 小林 英理子
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山