

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-21494

No. 160719

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	神戸市中央区波止場2番1号		機番	001920
環営	ユーザー名	ホテルオークラ神戸クリニック 様		納入日	
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成28年3月3日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成28年7月18日

修理依頼・苦情内容

洗浄後の内視鏡の水切れが悪い（総合メンテナンスご契約ユーザー様）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします。

[1]: 「洗浄後の内視鏡の水切れが悪い」につきまして

内視鏡に空気を送るエアポンプの性能劣化が原因と思われます。エアポンプを交換し配管経路を分解点検・清掃いたしました。

[2]: 定期交換部品および経年劣化した部品の交換を実施しました。

写真1: 定期交換部品



写真2: 交換部品一式；エアポンプ



[3]: 性能点検

- オゾン水濃度測定: 0.40~0.53 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度: 93.4% 酸素流量: 0.75 L/min 圧力: 0.098~0.182 MPa (AC100V、60Hz)
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常 運転カウンタ: 12421 回

交換部品

承認
安 16.7.19 田
審査
中 16.7.19 澤
作成
H28.7.19 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	エアポンプ、エアコンプレッサー	2台	
	定期交換部品	1式	
	吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		SPS-12012
	配管チューブ、パッキン	1式	タッチシート含む
	水位レベルセンサ	3本	LVLのみ
	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3