

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 9月 23日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300690	
作業年月日	平成 28年 9月 23日		作業時間	:	Hr
顧客名	神寄クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府摂津市別府3丁目8-3		電話番号	:	06-6379-3700
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 11月 26日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッパパネルを触っても反応しない。

不具合原因、作業内容

・コントロール基板の不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 404
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207/To2C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・コントロール基板を交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数:	14 回	更新（リセット）実施:	未実施	消毒:	2 回	消毒+アル:	13 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	9 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:	0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
コントロール基板		☒	1枚	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No. 0630410972 → No. 1119510978

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 28年 9月 23日

ご署名 神寄清一郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山