

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 8月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100798
作業年月日	平成 28年 8月 9日		作業時間	: _____ Hr
顧客名	日並内科外科医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市香寺町犬飼502		電話番号	: 079-232-1730
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 25年 8月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 659
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107/To1.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 790 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 2245 回	殺菌+7L: 389 回
	リークチェック: 1813 回	自己洗浄: 558 回	7Lアルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 1305/420 → NO. 1312/638
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 150307-010 → NO. 120801-030
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 前田 辰保

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山