

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 10月 24日

|       |                                          |                                                                       |                              |           |                                     |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                                                                       | 製造番号                         | : 300117  |                                     |
| 作業年月日 | 平成 28年 10月 24日                           |                                                                       | 作業時間                         | :         | Hr                                  |
| 顧客名   | たかだ内科医院 御中                               |                                                                       | ご担当                          | :         | 院長先生 様                              |
| 所在地   | 滋賀県近江八幡市日吉野町675                          |                                                                       | 電話番号                         | :         | 0748-33-1203                        |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当                          | :         | 様                                   |
| 納入年月日 | 平成 25年 10月 11日                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |           |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 3回目                          | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 712    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0204/T02BV  |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |                 |                                                     |              |               |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1093 回 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 876 回    | 消毒+アル: 2853 回 |
|          | リークチェック: 4 回    | 自己洗浄: 320 回                                         | アルコール単独: 7 回 | エア単独: 0 回     |

| 交換部品名称           | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                             |
|------------------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 定期交換部品セット        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.13061439 → NO.11060643    |
| 排水フィルター          |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO.110830-024 → NO.100113-013 |
| 給水フィルター（活性炭、中空糸） |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、         |
| パリスタ             |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし            |
| マニホールド周辺チューブ     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1式   |                                      |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年 10月 24日

たかだ内科医院

高野 香代子

ご署名

|      |                                                         |       |     |
|------|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社 大阪支店<br>大阪府大阪市中央区今橋1-6-1<br>TEL: 06-6228-3311 | 責任技術者 | 作業者 |
|      |                                                         |       | 中山  |