

保守点検・修理 報告書

管理 No.

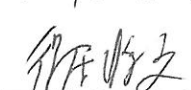
発行日 平成 28年 10月 19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300662	
作業年月日	平成 28年 10月 19日		作業時間	:	Hr
顧客名	とくいクリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府茨木市大池2丁目13-22		電話番号	:	072-636-1091
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 10月 20日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 715
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 430 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 69 回	消毒+アル: 362 回
	リークチェック: 367 回	自己洗浄: 229 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14041740 → NO. 11070687
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 140605-001 → NO. 140701-008
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	2016 年 10 月 19 日 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山