

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 8月 23日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号	: 300665
作業年月日	平成 28年 8月 23日	作業時間	: Hr
顧客名	やまかわ消化器クリニック 御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市垂水区日向2丁目1-4垂水駅前ゴールドビル2階	電話番号	: 078-704-3536
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 27年 11月 2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 649
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207/T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1558 回	更新(リセット) (実施)・未実施	消毒: 707 回	消毒+アル: 852 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 224 回	アルコール単独: 25 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 4041733 → NO. 4021691
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサー NO. 40527-006 → NO. 50223-014
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1式	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 8 月 23 日

ご署名

楠田 亜矢子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山