

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 9月 3日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 8 月 22 日 作業時間: Hr
顧客名	小坂矯正歯科 様 TEL: 03-3449-0541
所在地	東京都品川区東五反田5-28-9 五反田第3花谷ビル3F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100029	運転回数: 669	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 給水流量計の誤計測による給水供給過多 → 洗浄槽内の排水量過多の可能性			
処置、作業内容			
・ 給水流量計及び給湯流量計の交換（対策品）			
・ 排水ポンプ、排水フィルター3の交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水流量計		1		
2	給湯流量計		1		
3	排水ポンプ		1		
4	排水フィルター3		1		
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019年 9 月 4 日



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/08/22 富田	環PJ '19/08/22 日高