

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 11月 11日

|       |                                          |                                                                       |                              |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                        |                                                                       | 製造番号                         | : 1787                                        |
| 作業年月日 | 平成 28年 11月 11日                           |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                                          |
| 顧客名   | 山内医院 御中                                  |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 兵庫県西宮市甲東園3-1-37                          |                                                                       | 電話番号                         | : 0798-52-0306                                |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当                          | 様                                             |
| 納入年月日 | 平成 21年 4月 9日                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 4回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |                                        |           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 点検項目                      |                                        | 点検項目      |                                        |
| 電源釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン分解ファン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾンインジケータ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 酸素発生      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 蛍光灯                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置外 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置内 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄コネクタ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄チューブ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 細管洗浄 エアパージ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| アルコールフラッシュ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |

|      |               |                                                                                |                   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 1142 回 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 交換後運転回数: 164 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 93.9 %    | 流量: 0.79 L/min                                                                 | 圧力: 127 ~ 216 MPa |

|          |       |                                     |    |                                                                                   |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | < 交換部品製造番号 >                                                                      |
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                                                                           |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO, <input checked="" type="checkbox"/> → NO, <input checked="" type="checkbox"/> |
| 吸着筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし                                                           |
| 吸湿筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 |                                                                                   |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |                                                                                   |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H28 年 11 月 11 日

ご署名 山内 崇 義



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山