

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 11月 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300407
作業年月日	平成 28年 11月 日		作業時間	: / Hr
顧客名	あさくらクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県桜井市黒崎646-1		電話番号	: 0744-46-1114
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 11月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 561
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ファブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver 0205/TP2C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
Advance - W-II - EG-580NW2, EC-590ZP, 保管庫有り.			

装置 情報	交換後運転回数: 914 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 896 回	消毒+アル: 759 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 9 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: / 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 208/133 → NO. 1306/448
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 150223-015 → NO. 140715-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 山村 和美		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田